

ІНФОРМАЦІЯ щодо використання

Балон носовий Отоглоб (Otoglobe) проти негативного тиску у середньому вусі.

Уважно прочитайте весь вкладиш до упаковки, оскільки він містить важливу для Вас інформацію. Цей вкладиш містить відповіді на питання:

1. Що являє собою балон носовий **Отоглоб (Otoglobe)** і кому він підходить?
2. Для чого застосовується балон носовий **Отоглоб (Otoglobe)**?
3. Що Ви повинні врахувати перед використанням балону носового **Отоглоб (Otoglobe)**?
4. Як слід використовувати балон носовий **Отоглоб (Otoglobe)**?
5. Як часто і як довго слід користуватися балоном носовим **Отоглоб (Otoglobe)**?
6. Які побічні дії можливі?
7. Як слід зберігати балон носовий **Отоглоб (Otoglobe)**?
8. Інша інформація і вказівки.

1. Що являє собою балон носовий Отоглоб (Otoglobe) і кому він підходить?

Балон носовий **Отоглоб (Otoglobe)** складається з балону (латекс) та адаптера (поліпропілен). Балон носовий **Отоглоб (Otoglobe)** - це продукт для відновлення природним шляхом компенсації тиску у середньому вусі при порушенні його вентиляції.

Балон носовий **Отоглоб (Otoglobe)** підходить для дорослих і для дітей з трьох років.

2. Для чого застосовується балон носовий Отоглоб (Otoglobe)?



Балон носовий **Отоглоб (Otoglobe)** застосовується для профілактики та лікування при захворюваннях середнього вуха, наприклад, хронічний катар евстахієвої труби і середнього вуха. Якщо це захворювання не лікувати, воно може привести до накопичення рідини в середньому вусі (випоту у барабанної порожнини) і до погіршення слуху.

3. Що Ви повинні врахувати перед використанням балону носового Отоглоб (Otoglobe)?

Будь ласка, майте на увазі, що балон носовий **Отоглоб (Otoglobe)** не можна застосовувати при гострому запаленні середнього вуха (Otitis Media) і носовій кровотечі. При сильному нежиті користуванням балоном слід перервати, для запобігання потрапляння мікробів у середнє вуха. При наявності алергічної реакції на латекс слід, по можливості, запобігати контакт балону зі шкірою або слизовою оболонкою (облизування балону). Застосування **Отоглоб (Otoglobe)** дітьми завжди має контролюватися дорослими.

4. Як слід використовувати балон носовий Отоглоб (Otoglobe)?

- а) Обережно натягніть балон (який додається), як показано на рисунку, на підставку адаптера з поліпропілену таким чином, щоб він надійно закріпився в поглибленні краї підставки.
- б) Надуйте балон, вставивши закруглений кінець носового адаптера в ніздрю і притиснувши іншу ніздрю пальцем (див. рисунок). Глибоко Рисунок додається.

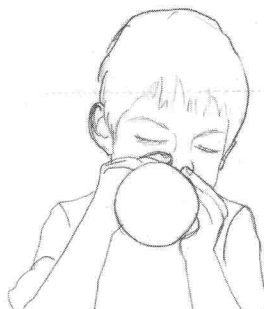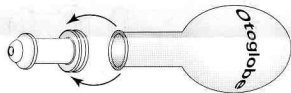

вдихніть і закрийте рот. Балон надувайте до розміру грейпфрута (див. рисунок).

с) Ви повинні відчувати у вусі клацання або яку-небудь іншу зміну, або шум.

д) Якщо у дітей виникнуть труднощі з надуванням балона, ми рекомендуємо, щоб спочатку його надув хтось із дорослих.

5. Як часто і як довго слід користуватися балоном носовим Отоглоб (Otoglobe)?

Балоном носовим **Отоглоб (Otoglobe)** слід користуватися кілька разів на добу, щонайменше, вранці і ввечері. Зазвичай тривалість лікування становить 2-3 тижні. При хронічному випоті у барабанну порожнину, балон носовий **Отоглоб (Otoglobe)** може використовуватися протягом кількох тижнів або навіть місяців. У будь-якому випадку для контролю успіху лікування слід проводити регулярну перевірку вух лікарем. Однієї упаковки балонів **Отоглоб (Otoglobe)** (6 балонів) вистачає на одне тритижневе лікування. Кожен балон **Отоглоб (Otoglobe)** слід використовувати не довше 4 днів. Потім балон може розтягуватися і не мати необхідний ефект. Тому ми рекомендуємо Вам перед початком лікування занести дати використання шести носових балонів в наступну таблицю:

Балон	1	2	3	4	5	6
Дата						

6. Які побічні дії можливі?

Побічні дії невідомі.

7. Як слід зберігати балон носовий Отоглоб (Otoglobe)?

Балон носовий **Отоглоб (Otoglobe)** слід зберігати в недоступному для дітей в сухому, захищеному від сонячного світла місці при температурі не вище 25 °C.

Носовий адаптер після кожного використання слід промивати водою або м'яким мильним розчином, а після декількох використань необхідно прокип'ятити адаптер з поліпропілену, кип'ятити не більше п'яти хвилин.

8. Інша інформація та вказівки.

Для забезпечення оптимального результату лікування дозволяється використовувати тільки оригінальні балони **Отоглоб (Otoglobe)** з носовими адаптерами **Отоглоб (Otoglobe)**. Балони **Отоглоб (Otoglobe)** мають, точно підібрану для мети їх застосування, еластичність. Використані носові балони можна викидати разом зі звичайним сміттям.

Бажаємо Вам успіху у лікуванні і одужання!

Виробник:

Др. Клаус Фарма ГмбХ
Якобсгассе 26, Д-72070 Тюбінген, Німеччина
www.drclauspharma.de

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «КГК»,
Україна, 04112 Київ, вул. Дегтярівська, 62.
Тел. +39(050)1897867

Дата останнього перегляду: 27.04.2018

